

# MEDICAL LINESMOOTH

F.A.S.D.

SISTEMA TERAPICO PER TRATTAMENTI DI  
RIMODELAMENTO CORPO E VISO



bexteri

ADVANCED TECHNOLOGY

## 4 FONTI ENERGETICHE IN UN UNICO DISPOSITIVO

### 1 INFRAROSSI FOCALIZZATI

La luce a infrarossi stimola l'attivazione cellulare aumentando l'apporto d'ossigeno e migliorando l'interscambio cellulare.

### 2 RADIOFREQUENZA BIPOLARE

La Radiofrequenza riscalda il derma in profondità e stimola il metabolismo, ottenendo un effetto lipolitico e antiage.

### 3 RULLI MASSAGGIANTI

Grazie alla loro azione, il trattamento sarà in grado di rimodellare le curve del corpo in modo efficace ma delicato.

### 4 ASPIRAZIONE VACUUM

La mobilizzazione dei tessuti ottenuta per aspirazione aumenta il flusso sanguigno e linfatico, favorendo l'eliminazione delle tossine.



## F.A.S.D. SICUREZZA ED EFFICACIA DEI TRATTAMENTI

Il sistema F.A.S.D. (Full Adaptive Source Device) che caratterizza Medical Linesmooth permette all'operatore di regolare effettivamente tutti i parametri funzionali del sistema consentendo di adattare i trattamenti alle necessità dei pazienti.

L'associazione di raggi infrarossi, radiofrequenza bipolare, massaggio meccanico e vacuum, ripristina l'equilibrio fisiologico del derma, favorisce il drenaggio linfatico a beneficio del microcircolo sanguigno.

La combinazione sinergica della radiazione infrarossa e RF bipolare indotta nella pelle accresce la diffusione dell'ossigeno intracellulare riscaldando i tessuti.

L'emissione così controllata ed ottimizzata della RF permette una maggiore penetrazione di energia nel sottocutaneo salvaguardando la superficie.

## UNA SOLA APPLICAZIONE PER:

- LASSITÀ CUTANEE
- TONIFICAZIONE
- TRATTAMENTI ANTIAGE
- ADIPOSITÀ LOCALIZZATE P.E.F.S.



L'aspirazione vacuum e i rulli specificatamente progettati per massaggiare in profondità manipolando e distendendo i tessuti, assicurano risultati mirati ed efficaci.

La sonda di controllo termico posta sul manipolo large garantisce di lavorare in sicurezza con risultati performanti.

Questa combinazione energetica induce il processo lipolitico riducendo le cavità lipidiche e di conseguenza le circonferenze delle aree trattate, dando alla cute un aspetto disteso ed uniforme senza traumi per il paziente che già al primo trattamento percepisce una piacevole sensazione di comfort.

## 25 ANNI DI TRATTAMENTI EFFICACI

MEDICAL LINESMOOTH F.A.S.D. RAPPRESENTA L'APICE DELLO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA

DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO E PIÙ DI 2 MILIONI DI TRATTAMENTI EFFETTUATI



**RIDUZIONE / RIMODELLAMENTO**  
6 trattamenti



**RIDUZIONE / RIMODELLAMENTO**  
6 trattamenti



**TONIFICAZIONE VISO**  
4 trattamenti



**TRATTAMENTO P.E.F.S.**  
4 trattamenti



**TRATTAMENTO P.E.F.S.**  
4 trattamenti



**RIDUZIONE CIRCONFERENZE**  
5 trattamenti

## TESTINE INTERCAMBIABILI PER UNA GARANZIA DI MASSIMA IGIENE



TESTINA  
LARGE



MANIPOLO  
LARGE



MANIPOLO  
SMALL



TESTINA  
SMALL

### SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY TOUCHSCREEN | 7 POLLICI

RADIOFREQUENZA | BIPOLARE 1 MHz FINO A 65W

INFRAROSSI | 700 - 2000 nm FINO A 50W

DIMENSIONI | 360 x 550 x 900 mm

PESO | 30 Kg.

METODO DI LAVORO | RF/ IR/ VACUUM/ RULLI MECCANICI

MANIPOLO LARGE | 40 x 40 mm RF/ IR/ VACUUM/ RULLI MECCANICI

MANIPOLO SMALL | 25 x 25 mm RF/ IR/ VACUUM

Dispositivo medico CE classe I in conformità con le seguenti norme vigenti

EMC: EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55014-1; EN55014-2

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I



PRODOTTO DA

**BEXTERI**

Alfiano Natta (AL)

Piazza Vittorio Emanuele III 6/A, ITALY

TEL +39 01411922135

MAIL [info@bexteri.it](mailto:info@bexteri.it)

WEB [bexteri.it](http://bexteri.it)

FB/IG Bexteri

